

18<sup>(5×12cm)</sup>枚入  
3枚×6袋

# 朝までしっかり 10時間冷却持続!

## 特 長

- 急な発熱に、そのまま使えます。
- 冷却時間が**10時間**持続する冷却ジェルシートです。
- 肌にやさしい弱酸性のシートです。

※ジェルに含まれた水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます。



発熱時に



歯痛時に



打ち身・ねんざ  
時の熱に



勉強後の  
リフレッシュに

## ご使用方法

●透明フィルムをはがし、冷やしたい部分に貼ってください。●冷蔵庫等で冷やしてから使用すると、より高い冷却効果が得られます。(冷凍庫には入れないでください。)●冷却効果は10時間持続します。10時間が目安ですが効果を感じなくなりましたらお取りかえください。(発熱温度や使用環境により冷却時間が短くなることがあります。)●使用部位に応じて、適当な大きさにハサミでカットして使用してください。

### 使用上の注意 ※ご使用前に、必ずお読みください。

●目の周囲、粘膜、及び湿疹、かぶれ、日焼けなど皮膚の異常がある部位には使用しないでください。●汗をかいていたり、髪の毛や眉にかかると貼りつきが悪くなりますので、注意してください。貼り直しをくり返すと貼りつきが悪くなりますので、なるべく避けてください。●乳幼児にご使用になる場合は、保護者の監視のもと使用し、食べたりしないよう、口や鼻をふさがないように、充分にご注意ください。●お子様が勝手にシートをはがすような場合は、テープ等ではがれないように補ってください。(口や鼻に貼り付くと窒息するおそれがあります。)●開封後は、冷却効果が徐々に低下してしまいますので、できるだけ早めに使用してください。未使用分は袋に入れ、開封口をしっかりと折り曲げ、シートが外気に触れないように箱に入れて保管してください。●肌の弱い方は、はれ、かぶれ・かゆみ等がおこることがありますのでご注意ください。また、皮膚に異常が現れた場合は、すぐに使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談ください。●直射日光や高温になる場所を避け、なるべく涼しい所に保管してください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●シートをはがした際、ジェルが肌に残った場合は水で洗い流すか、濡れたタオルで拭き取ってください。

本品は医薬品ではありません。発熱が続く場合は医師にご相談ください。

**本品は食べられません**



※ゴミを分別する際には、各市町村の区分に従ってください。

品名: 熱ちゅール(子供用)  
枚数: 18枚入(3枚×6袋)  
サイズ: 50mm×120mm  
成分: パラベン、ゼラチン、EDTA-2Na  
ポリソルベート80、他配合

製造番号

発売元  
**ラクール薬品販売株式会社**  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆  
フリーダイヤル 0120-86-8998

A

MADE IN JAPAN